


SCHÉMA D'INSTALLATION


Attention à bien lire chaque détail



1 Ouvrir le couvercle du filtre, placer le filtre souple au milieu et revisser le couvercle du filtre (note : l'élément de filtre est composé de 2 sens, positifs et négatifs)

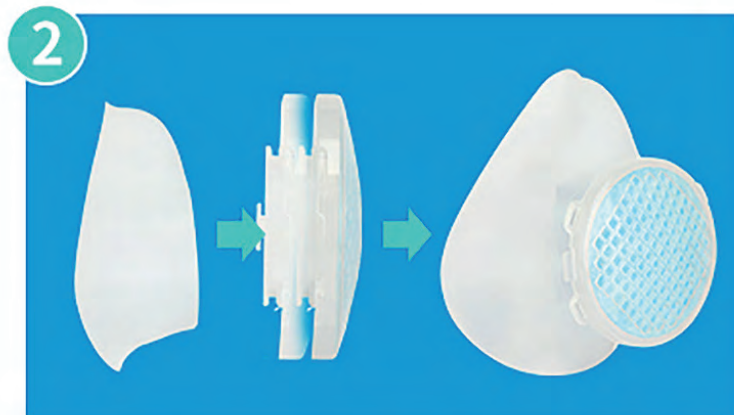

2 Installer le corps du masque en silicone et placer le noyau de filtrage. Retirez la cage montée sur le masque en silicone.

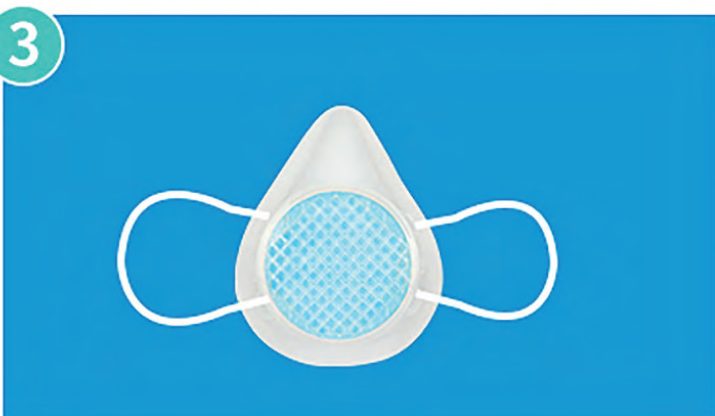

3 Installez la lanière sur le masque. Pour cela insérez la lanière dans les trous sur les côtés gauche et droit du masque.



4 Posez le masque sur votre visage. Réglez la position de la lanière, puis ajuster le serrage pour obtenir pour le meilleur confort et pouvoir porter durablement votre masque.

ATTENTION

Avant d'installer le filtre, veuillez stériliser le masque, le couvercle et les lanières 5 mn dans de l'eau bouillante